

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS AVEC TÊTIÈRE RÉGLABLE

VERONE

GARANTIES

(dans des conditions « normales » d'utilisation)

• Châssis métal fixe = 2 ans

• Moteur(s) = 2 ans

• Mécanisme / structure bois = 2 ans

• Transformateur / Télécommande = 2 ans

COMPOSANTS

Suspension et garniture

- Suspension : ressorts type Nosag anti affaissement + ressorts verticaux enséchés hélicoïdaux
- Assise : mousse de polyuréthane de densité 40g/m³
- Accoudoirs : mousse de polyuréthane de 24kg/m³
- Dossier : fibres nylon.

Structure

- Châssis métal et structure en bois massif (Eucalyptus)

Pièces Electriques CE

- Transformateur : tension Input AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A / Output DC 29V 1.80A
- Vérins : DC 24V / 72 W
 - Moteur principal Push 6000 N
 - Moteur dossier Push 4000 N
- Télécommande filaire 6 touches

Revêtement

TISSU FINITION POLAIRE

- Composition : 100% polyester 415 g/M²
- Martindale : test de résistance à l'abrasion >40 000 tours
- Spécificités : nouveau tissu « Chenillé » très tendance répondant à la norme OEKO-TEX Standard 100 garantissant son innocuité et l'absence dans sa composition de 100 substances identifiées comme potentiellement nocives ou toxiques pour la santé et/ou l'environnement

Tissu AXEL HERITAGE

AXEL Héritage : une collaboration avec l'éditeur français de tissus : Maison THEVENON depuis 1908 :Collection Golden Life

- Composition : 100% polyester finition velours 300 g/M²
- Martindale : test de résistance à l'abrasion 50 000 tours
- Spécificités : nouveau tissu "floral" très tendance répondant à la norme OEKO-TEX Standard 100 garantissant son innocuité et l'absence dans sa composition de 100 substances identifiées comme potentiellement nocives ou toxiques pour la santé et/ou l'environnement

Pour enlever la poussière, utilisez un aspirateur. Toute tache ou salissure doit être nettoyée rapidement avec une solution de savon neutre à l'aide d'un chiffon en effectuant des mouvements circulaires fluides.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Tête « 2D » ajustable en inclinaison et articulée sur chaque extrémité par un mécanisme manuel pour un meilleur maintien latéral de la tête
- Continuité assise repose pieds pour le maintien et le repos du segment jambier
- 2 moteurs pour un fonctionnement indépendant du dossier et de l'assise et donc, une combinaison infinie de positions

Options possibles	Accessoires
Batterie Lithium rechargeable	Protège fauteuil intégral



Pour un confort sans fil,
batterie rechargeable au lithium

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : Chine · Poids : 49Kg
Distributeur en France : Medtrade SAS

ADAPTÉ POUR
LES PERSONNES



Jusqu'à
1m80
Max 110kg

Tissu "AXEL HERITAGE"



Émeraude

RÉF. 106-03

code EAN 3701183206032



Tomette

RÉF. 106-05

code EAN 3701183260607



Laiton

RÉF 106-06

code EAN 3701183204069




Beige

RÉF 106-44


code EAN 3701183206445

POSITIONS

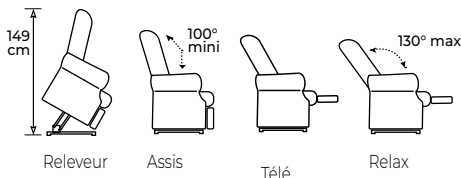

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM

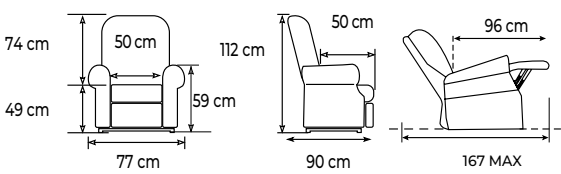

Ecartement** du mur : 60 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier relevé «droit» (inclinaison mini))

Garantie

LA SOCIETE GARANTIT LE 1ER UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION.

La société choisira entre l'option de réparer la pièce ou d'échanger la pièce défectueuse, dans la mesure où les conditions normales d'utilisation ont été respectées. Toute application de la garantie doit faire l'objet d'une autorisation préalable de Medtrade. LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT (du fauteuil/canapé ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic

La garantie s'applique pour des conditions normales d'utilisation A TITRE D'EXEMPLE, LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Aux pièces d'usure et notamment les revêtements (Tissus, velours, microfibres, cuir vinyle/PU...).
- Aux mécanismes de ciseaux/pantographes tordus ou cassés à la suite d'une mauvaise utilisation. (Exemple : entrée ou sortie du fauteuil lorsque le repose pieds est relevé ou s'assoit sur la repose pieds lorsque ce dernier est en position relevé).
- Lorsque la pièce faisant l'objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à

des fins abusives, à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention, modifiée ou réparée par des personnes non agréées.

- Lorsque les composants électriques ont fait l'objet de choc (télécommande tombée sur le sol...)
- Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil (pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu'ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple).
- Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre).
- Lorsque la distance d'écartement du mur n'est pas respectée.
- Lorsque l'utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil.
- Lorsque le fauteuil est utilisé au-delà des limites de tolérance de poids (selon les indications de la brochure commerciale).
- Pour couvrir les coûts de visites inutiles d'un réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défectueuse, mauvaise utilisation/informations-enseignements sur le produit).

VERONE

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS AVEC TÊTIÈRE RÉGLABLE



AXEL CONFORT

Une marque de la société MEDTRADE - S.A.S au capital de 400 000€ - 70, rue du Moulin Vedel - 30900 Nîmes
RCS Nîmes 444 897 128 - TVA intra : FR 11 444 897 128 - IBAN FR76 1660 7003 5008 1217 1958 681

VOS CONTACTS

Fontenay-Trésigny

AXEL CONFORT
ZAC de Fregy
4, rue Marguerite Perey
77610 FONTENAY-TRESIGNY Tél. :
09 71 16 87 94
commercial.fontenay@medtrade.fr

Nord - Champagne - Haute Normandie

Stéphane LUCHART / 06.11.62.16.22
luchart.stephane@wanadoo.fr

Sud Ouest

Rodolphe FONTENEAU
rodolphe.fonteneau@medtrade.fr / 06.59.93.99.00

Est - Bourgogne - Franche Comté

Mathis CUNIN
Mathis.CUNIN@medtrade.fr / 06.32.01.49.59

Ouest - Centre Ouest - Val de Loire

Thierry JOURDAS / 07.64.19.50.68
thierry.jourdas@medtrade.fr

IdF

Jeanne MILLER / 06.98.36.68.24
jeanne.miller@medtrade.fr

Sud Est

Marlène de FROIDCOURT / 07.60.38.29.05
marlene.defroidcourt@medtrade.fr

Occitanie (30-34-11-66)

Ruben
THEVENET / 07.65.28.11.68
commercial.nîmes@medtrade.fr

