



MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE



FAUTEUIL MEDTRADE & AXEL CONFORT

Chère Cliente, Cher Client,

Vous avez fait l'acquisition d'un fauteuil de la marque MEDTRADE ou AXEL CONFORT et nous vous remercions pour votre choix et l'intérêt que vous portez à nos produits. Nous avons veillé à apporter un soin tout particulier quant à la sélection et à la qualité des composants de nos fauteuils afin de vous en garantir la plus grande satisfaction d'utilisation possible, sans entretien particulier.



Nous vous souhaitons de profiter pendant de nombreuses années du confort et des fonctionnalités de votre fauteuil. Prenez le temps de parcourir ce manuel afin de prendre connaissance des consignes de sécurité, d'utilisation et de garantie. Pour toutes informations complémentaires, contactez le magasin chez qui vous avez acheté votre fauteuil..

SECURITE : le fauteuil releveur est conçu pour vous aider à vous asseoir et vous relever. Les enfants ne doivent pas être autorisés à s'en servir sans la surveillance d'un adulte. Lorsque vous ne vous servez pas, le fauteuil doit être maintenu en position assise.




IMPORTANT

Lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser votre fauteuil.

- Votre fauteuil releveur a été conçu avec des composants et « technologies » sélectionnés et testés pour améliorer sa solidité et sa fiabilité.
- Il vous est recommandé d'utiliser votre fauteuil avec précaution et de vous assurer que vous l'utilisez en toute sécurité pour vous et votre entourage. Les consignes qui suivent vous conseillent sur les dispositions à prendre, pour utiliser votre fauteuil en toute sécurité.
- Pour vous familiariser avec le bon fonctionnement et la bonne utilisation de votre fauteuil, vous pouvez vous faire aider d'une personne de votre famille, d'un personnel soignant, ou de votre installateur qui vous délivrera les explications nécessaires.

CONSIGNES DE SECURITE


- Prenez soin quand vous déballez votre fauteuil de ne pas vous blesser ou d'abîmer le fauteuil. Les emballages plastiques ne doivent pas être laissés à la portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou de suffocation.
- Tenez à distance les enfants ou animaux domestiques de votre fauteuil quand vous l'utilisez. Evitez la proximité « d'obstacles » (murs, consoles, cannes, cadre de marche...) pouvant contrarier le bon fonctionnement du mécanisme de votre fauteuil en « mouvement ». Veillez également à ce que des vêtements amples ou couverture ne se coincent dans les mécanismes (ciseaux, pantographes...)
- Ne laissez pas d'enfant jouer avec votre fauteuil, ou l'utiliser.
- **Lorsque le fauteuil n'est pas utilisé, il est préférable de le laisser en position assise, les pieds, sabots ou patins arrière en appui.**

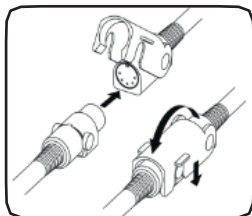



- **Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y installer.**
- **Ne laissez personne s'asseoir sur les accoudoirs du fauteuil ou sur le repose-jambes ou sur vos genoux quand vous êtes installé dans le fauteuil.**
- Ne mettez pas vos doigts ou vos mains entre les différents coussins du fauteuil, entre l'assise et les accoudoirs, lorsque vous y êtes assis ou lorsque le fauteuil est en « mouvement ».
- Débranchez s'il y a lieu votre fauteuil avant de rechercher des objets tombés dans ou sous le fauteuil.
- Ne faites pas fonctionner le fauteuil si un obstacle se trouve dessous ou devant le repose-jambes, sous ou derrière le fauteuil.
- Ne fumez pas dans votre fauteuil lorsqu'il est en mouvement, lorsque vous actionnez le mécanisme à l'aide de la télécommande ou lorsque vous vous y reposez.
- Pour prévenir tout accident électrique : n'immergez aucun des éléments électriques de votre fauteuil dans du liquide - n'aspergez aucun liquide sur ces éléments électriques - ne jamais ouvrir un élément électrique. Votre fauteuil est équipé d'un transformateur permettant de réduire la tension de votre prise murale 220V courant alternatif (AC) en 29V courant continu (DC)
- La garantie sera annulée si un des éléments électriques est ouvert par une personne non habilitée. Veillez à ce que les éléments électriques soient à l'abri de l'humidité.
- **Assurez-vous que le fauteuil est à bonne distance du mur.** Ne pas respecter cette consigne peut endommager votre fauteuil et annuler la garantie.
- N'utilisez pas de rallonge électrique pour relier votre fauteuil releveur ou relax électrique à une prise électrique, ou le brancher au courant secteur. Les sous-tensions peuvent endommager le moteur. Evitez un nombre excessif d'appareils ménagers branchés sur le même circuit ou la même prise.
- Veillez à respecter les capacités du fauteuil en termes de poids supporté (cf. documentation commerciale).
- Pour ce fauteuil, le poids maximum de l'utilisateur est de 100 kg.

INSTALLATION DE VOTRE FAUTEUIL

1. Placez votre fauteuil à l'endroit choisi de votre pièce en gardant une distance minimale d'au moins 55 cm entre le mur ou tout autre obstacle et l'arrière de votre fauteuil. (Dossier droit en position assise).
2. Certains tapis (épais) peuvent gêner le bon fonctionnement de votre fauteuil. Assurez-vous que le repose-jambes ne frotte pas sur le tapis quand vous l'actionnez.
3. Retirez le transformateur de son emballage.
4. Pour les fauteuils équipés d'un mécanisme électrique, connectez le câble électrique du moteur au transformateur et branchez le transformateur à une prise d'alimentation murale de courant secteur 220V.
5. Installation du dossier : Actionnez la télécommande jusqu'à ce que les pattes de fixation du dossier soient dégagées de l'arrière de l'assise.
6. Assurez-vous que le sol soit « de niveau ». Sinon compensez le niveau à l'aide des pieds ajustables lorsque votre fauteuil en est équipé (réglage de la hauteur assuré par des patins antidérapants (ne marquant pas le sol) montés sur une tige filetée à visser ou dévisser. Un mauvais appui (calage) sur les pieds du fauteuil peut entraîner pendant son utilisation un bruit de craquement et/ou un mouvement discontinu et non régulier lors du fonctionnement des mécanismes).
7. Assurez-vous que le câble électrique (reliant le vérin au transformateur) ne soit pas coincé dans les articulations du fauteuil.

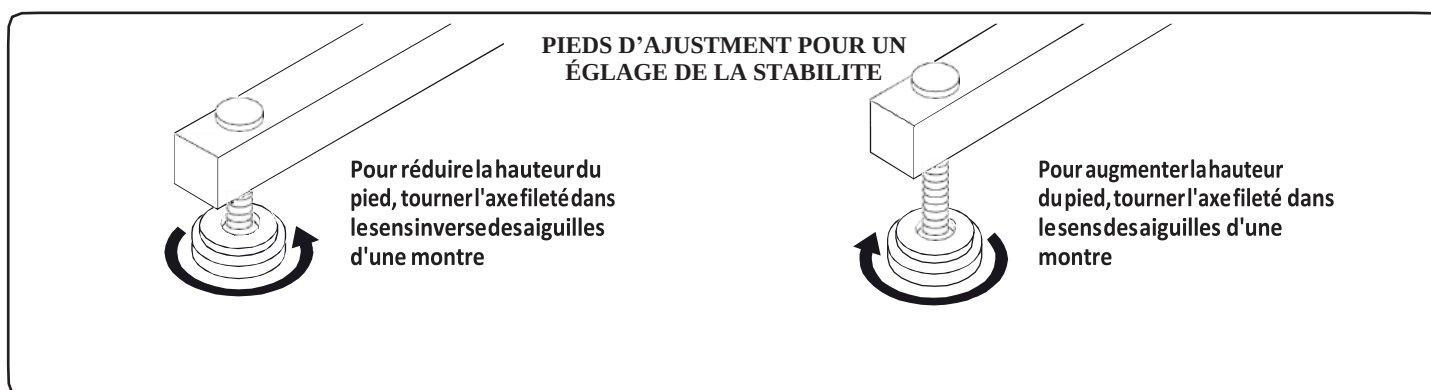


ASSEMBLAGE DU DOSSIER D'UN FAUTEUIL

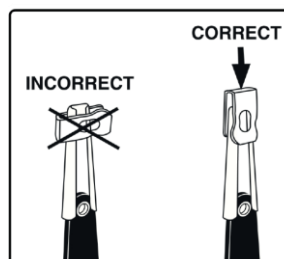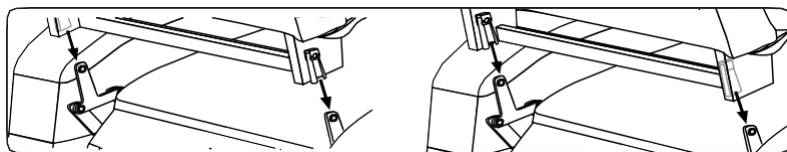

Etape 1 : Inclinez le dossier et positionnez-le entre les pattes de fixation.

Etape 2 : Faites coulisser l'équerre dans le rail de la goulotte jusqu'à ce qu'il soit clipsé (jusqu'à ce que vous entendiez un click significatif).

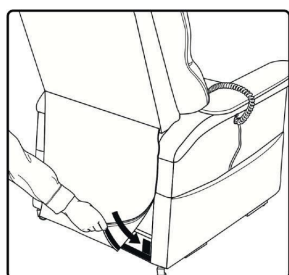

Si votre fauteuil en est équipé, positionner la jupe arrière pour cacher le mécanisme du fauteuil.

Le fauteuil doit être déplacé, débranché et en position assise. Déplacer le avec l'aide d'une seconde personne en évitant de tirer ou d'écarter les accoudoirs, le dossier ou le repose pieds.

Placez votre fauteuil à l'emplacement choisi de la pièce en espaçant votre fauteuil du mur d'au moins 55 cm. Pour un fauteuil 2 moteurs avec la position lit, écarter le fauteuil du mur d'une distance équivalente à la hauteur du dossier.

UTILISATION DE VOTRE FAUTEUIL

• TELECOMMANDE DE FAUTEUIL RELEVEUR MONOMOTEUR



Pour incliner votre dossier, appuyez sur la touche ▼ (T2) et maintenez appuyée jusqu'à la position désirée, puis relâchez la touche.

Pour retourner à la position Assise, appuyez sur la touche ▲ (T1) et maintenez appuyée jusqu'à la position assise, puis relâchez la touche.

Pour mettre le fauteuil en position Releveur, appuyez sur la touche ▲ (T1) maintenez appuyée touche jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez

Pour retourner en position Assise, appuyez sur la touche ▼ (T2) et maintenez appuyée jusqu'à la position assise, puis relâchez la touche.

Pour passer de la position Relax ou Repos à la position Releveur, appuyez sur la touche ▲ (T1) et maintenez appuyée ; le fauteuil passera par la position Assise et commencera à se lever. Relâchez la touche quand vous avez atteint la position souhaitée.

Pour passer de la position Releveur à la position Repos ou Relax, appuyez sur la touche ▼ (T2) et maintenez appuyée, le fauteuil passera par la position Assise et commencera à s'incliner. Relâchez la touche quand vous avez atteint la position souhaitée.

S'installer dans le fauteuil (en position releveur), devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur la touche ▲ (T1) et relever votre fauteuil jusqu'à la hauteur souhaitée. La hauteur adaptée varie d'une personne à une autre, en fonction des hauteurs de jambes et besoins de chacun. Le coussin d'assise doit venir soutenir les fessiers. Il faut relever le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous risqueriez de vous blesser et vous risquez d'endommager votre fauteuil. Appuyez sur la touche de la fonction inclinaison pour faire descendre le fauteuil. Maintenez la touche appuyée et laissez-vous accompagner confortablement appuyé sur les fessiers jusqu'à la position assise ou jusqu'à la position relax ou repos souhaitée. Puis relâchez la touche.

Sortir du fauteuil (en position releveur), appuyez sur la touche ▲ (T1) et relevez votre fauteuil jusqu'à la hauteur vous permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez la touche. Remettre le fauteuil, après en être sorti, en position Assise (assise à l'horizontale = patins, sabots ou pieds arrière du fauteuil en appui) pour qu'aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil.

Lorsque vous actionnez le mécanisme du fauteuil veillez à être bien positionné dans le fauteuil, calé au centre et confortablement installé au fond de l'assise.

NB: si vous n'utilisez pas la fonction releveur pour l'aide à l'assise, si celui-ci est en position assise, veillez à ce que le repose pieds soit en position verticale et la surface d'assise en position « horizontale ». La partie arrière du fauteuil doit être bien en appui sur la structure métallique fixe posée sur le sol. Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous asseoir lorsque celui-ci est légèrement incliné ou relevé. Vous risquez d'endommager les têtes et pattes de fixation du vérin.

• TELECOMANDE DE FAUTEUIL RELEVEUR BI-MOTEUR



Pour incliner votre dossier, appuyez sur la touche ► (T3) et maintenez appuyée jusqu'à la position désirée, puis relâchez la touche.

Pour retourner à la position Assise, appuyez sur la touche ◀ (T4) et maintenez appuyée jusqu'à la position assise, puis relâchez la touche.

Pour mettre le fauteuil en position Releveur, appuyez sur la touche ▲ (T1) et maintenez appuyée jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez.

Pour retourner en position Assise, appuyez sur la touche ▼ (T2) et maintenez appuyée jusqu'à la position assise, puis relâchez la touche.

Pour passer de la position Relax ou Repos à la position Releveur, appuyez sur la touche ▲ (T1) et maintenez appuyée ; le fauteuil passera par la position Assise et commencera à se lever. Relâchez la touche quand vous avez atteint la position souhaitée.

Pour passer de la position Releveur à la position Repos ou Relax, appuyez sur la touche ◀ (T4) et maintenez appuyée, le fauteuil passera par la position Assise et commencera à s'incliner. Relâchez la touche quand vous avez atteint la position souhaitée.

S'installer dans le fauteuil (en position releveur), devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur la touche ▲ (T1) et relever votre fauteuil jusqu'à la hauteur souhaitée. La hauteur adaptée varie d'une personne à une autre, en fonction des hauteurs de jambes et besoins de chacun. Le coussin d'assise doit venir soutenir les fessiers. Il faut relever le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous risqueriez de vous blesser et vous risquez d'endommager votre fauteuil. Appuyez sur la touche de la fonction inclinaison pour faire descendre le fauteuil. Maintenez la touche appuyée et laissez-vous accompagner confortablement appuyé sur les fessiers jusqu'à la position assise ou jusqu'à la position relax ou repos souhaitée. Puis relâchez la touche.

Sortir du fauteuil (en position releveur), appuyez sur la touche ▲ (T1) et relevez votre fauteuil jusqu'à la hauteur vous permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez la touche. Remettre le fauteuil, après en être sorti, en position Assise (assise à l'horizontale = patins, sabots ou pieds arrières du fauteuil en appui) pour qu'aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil.

Lorsque vous actionnez le mécanisme du fauteuil veillez à être bien positionné dans le fauteuil, calé au centre et confortablement installé au fond de l'assise.

NB: si vous n'utilisez pas la fonction releveur pour l'aide à l'assise, si celui-ci est en position assise, veillez à ce que le repose pieds soit en position verticale et la surface d'assise en position «horizontale». La partie arrière du fauteuil doit être bien en appui sur la structure métallique fixe posée sur le sol. Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous asseoir lorsque celui-ci est légèrement incliné ou relevé. Vous risquez d'endommager les têtes et pattes de fixation du vérin.

TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT

- Votre fauteuil électrique ne nécessite aucun entretien particulier. Votre fauteuil peut être équipé d'un témoin lumineux sur la télécommande.
- Ce témoin s'allume (couleur verte) lorsque vous appuyez sur une des touches de la télécommande (vous indiquant ainsi que votre télécommande est branchée et fonctionne).
- Votre fauteuil électrique peut être pourvu d'un témoin lumineux sur le transformateur. Ce témoin est allumé en permanence (vert) lorsque votre fauteuil est branché sur le courant (220V).
- Ces témoins lumineux « d'auto diagnostic » vous permettent de contrôler et vérifier par vous-même rapidement et facilement l'état des branchements (exemple : un câble de raccordement pincé, écrasé ou débranché) et des composants électriques (transformateur grillé suite à une surtension après un orage par exemple). Ces témoins peuvent vous servir à diagnostiquer un éventuel dysfonctionnement.
- En cas de besoin, ils permettront également à votre revendeur d'identifier un type de panne, la ou les pièces défectueuses.
- Si votre fauteuil rencontre un problème de fonctionnement, cessez d'utiliser votre fauteuil avant d'avoir décelé d'où vient le problème (Problème de transformateur, de télécommande, de cordons ou de raccordements électriques, problème de mécanisme, ou de vérin...).
- Contactez le magasin chez qui vous avez acheté votre fauteuil. Il sera capable de résoudre le problème, d'intervenir et d'effectuer les changements si nécessaire. Il vous demandera si tous les témoins lumineux sont allumés (vert) ou si une diode ne s'allume pas. Vérifiez que les branchements sont correctement réalisés. Les équipements électriques (transformateur, vérins...) répondent aux normes et réglementation CE en vigueur.

CONSEILS D'ENTRETIEN DU REVETEMENT DE VOTRE FAUTEUIL

- Brossez à l'aide d'une brosse souple ou aspirez régulièrement votre fauteuil pour éliminer poussière, miettes et matières textiles ou autres amalgamées.
- Pour les tâches, n'utilisez ni détergents forts, ni dissolvants. Utilisez une eau tiède savonneuse ou éventuellement un shampoing pour tissu d'ameublement. Utilisez une brosse souple en effectuant un mouvement circulaire. Épongez, laissez sécher et aspirez la surface concernée. (Faites un essai d'abord sur une petite zone non voyante pour valider votre solution de nettoyage).
- N'exposez pas le revêtement de votre fauteuil directement à une source de chaleur. (Centrale vapeur, fer à repasser, cigarettes ou cendres). Évitez les sources lumineuses directes trop fortes.

GARANTIES

En sus des obligations légales visant à garantir la conformité du bien, votre fauteuil bénéficie d'une garantie commerciale.

MEDTRADE, AU TRAVERS DE SON DISTRIBUTEUR, GARANTIT LE 1^{er} UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION DE LA FAÇON SUIVANTE A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.

GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE À 2 ANS

- ⇒ MEDTRADE garantit pendant 2 ans le châssis en bois et le mécanisme du fauteuil (châssis fixe, mécanisme de relevage et mécanisme de bascule).
- ⇒ MEDTRADE garantit pendant 2 ans le transformateur et le(s) moteur(s). La main d'œuvre est comprise dans la limite de 1 an.
- ⇒ MEDTRADE garantit pendant 2 ans la télécommande.
- ⇒ LA GARANTIE COMMERCIALE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT ((du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s), de la télécommande) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil, les pièces défectueuses ou la télécommande et établir un diagnostic.

Dans tous les cas de figure, la Main d'œuvre est comprise dans la garantie dans la limite de 1 an.

N.B. : Le fabriquant se réserve le droit de remplacer seulement la pièce du mécanisme qui s'avère défectueuse. En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protections et dispositifs de sécurité. Lisez et suivez les instructions, consignes et mise en garde pour éviter les risques de vous blesser ou d'endommager votre intérieur et de prendre le risque d'annuler la présente garantie.

CES GARANTIES S'APPLIQUENT POUR DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

A TITRE D'EXEMPLE, LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Aux pièces d'usure et notamment les revêtements tissus, velours, skaï ou autres revêtements
- Lorsque la pièce faisant l'objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à des fins abusives, à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention ou lors de l'ouverture des emballages de transport et de protection, modifiée ou réparée par des personnes non agréées
- Lorsque les composants électriques ont fait l'objet de choc (télécommande tombée sur le sol)
- Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil (pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu'ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple).
- Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre)
- Lorsque la distance d'écartement du mur n'est pas respectée
- Lorsque l'utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil
- Lorsque le fauteuil est utilisé au-delà des limites de tolérance de poids (le poids maximum supporté est en moyenne de 100kg)
- Pour couvrir les coûts de visites à domicile du réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défaillante, informations- renseignements sur le produit)
- Aux dommages résultant de l'abus, mauvais usage, réparations non autorisées, négligence, accidents, altérations, chocs ou modification du produit.
- Aux dommages causés pendant la manipulation.
- A tous dommages extraordinaires, directs ou indirects.
- Après la période de garantie, le fabriquant n'aura aucune obligation de quelque type que ce soit.
- Lorsque le fauteuil a été modifié, qu'il n'est plus conforme à l'origine ou que des composants ont été modifiés ou remplacés par des composants non conformes à l'origine.

VOTRE REVENDEUR

Inscrivez et complétez ici, le numéro de série de votre fauteuil :

.....

Ce numéro vous sera demandé pour toute intervention en cas de SAV

date d'achat :/...../20.....

Nom de votre modèle :