



MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE



FAUTEUIL de la gamme SENIORTYS

Chère Cliente, Cher Client,

Vous avez fait l'acquisition d'un fauteuil de la marque SENIORTYS et nous vous remercions pour votre choix et l'intérêt que vous portez à nos produits. Nous avons veillé à apporter un soin tout particulier quant à la sélection et à la qualité des composants de nos fauteuils afin de vous en garantir

la plus grande satisfaction d'utilisation possible, sans entretien particulier. Nous vous souhaitons de profiter pendant de nombreuses années du confort et des fonctionnalités de votre fauteuil.

Prenez le temps de parcourir ce manuel afin de prendre connaissance des consignes de sécurité, d'utilisation et de garantie. Pour toutes informations complémentaires, contactez le magasin chez qui vous l'avez acheté.

SECURITE : le fauteuil releveur est conçu pour vous aider à vous relever. Les enfants ne doivent pas être autorisés à s'en servir sans la surveillance d'un adulte. Lorsque servez pas, le fauteuil doit être maintenu en




IMPORTANT

Lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser votre fauteuil.

- Votre fauteuil releveur a été conçu avec des composants et « technologies » sélectionnés et testés pour améliorer sa solidité et sa fiabilité.
- Il vous est recommandé d'utiliser votre fauteuil avec précaution et de vous assurer que vous l'utilisez en toute sécurité pour vous et votre entourage. Les consignes qui suivent vous conseillent sur les dispositions à prendre, pour utiliser votre fauteuil en toute sécurité.
- Pour vous familiariser avec le bon fonctionnement et la bonne utilisation de votre fauteuil, vous pouvez vous faire aider d'une personne de votre famille, d'un personnel soignant, ou de votre installateur qui vous délivrera les explications nécessaires.

CONSIGNES DE SECURITE

- Prenez soin quand vous déballez votre fauteuil de ne pas vous blesser ou d'abîmer le fauteuil. Les emballages plastiques ne doivent pas être laissés à la portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou de suffocation.
- Tenez à distance les enfants ou animaux domestiques de votre fauteuil quand vous l'utilisez. Evitez la proximité « d'obstacles » (murs, consoles, cannes, cadre de marche...) pouvant contrarier le bon fonctionnement du mécanisme de votre fauteuil en « mouvement ». Veillez également à ce que des vêtements amples ou couverture ne se coincent dans les mécanismes (ciseaux, pantographes...)
- Ne laissez pas d'enfant jouer avec votre fauteuil, ou l'utiliser.
- **Lorsque le fauteuil n'est pas utilisé, il est préférable de le laisser en position assise, les pieds, sabots ou patins arrière en appui.**

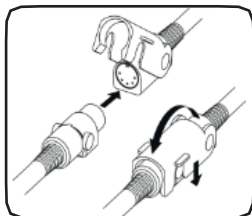


- **Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y installer.**
- **Ne laissez personne s'asseoir sur les accoudoirs du fauteuil ou sur le repose-jambes ou sur vos genoux quand vous êtes installé dans le fauteuil.**
- Ne mettez pas vos doigts ou vos mains entre les différents coussins du fauteuil, entre l'assise et les accoudoirs, lorsque vous y êtes assis ou lorsque le fauteuil est en « mouvement ».
- Débranchez s'il y a lieu votre fauteuil avant de rechercher des objets tombés dans ou sous le fauteuil.
- Ne faites pas fonctionner le fauteuil si un obstacle se trouve dessous ou devant le repose-jambes, sous ou derrière le fauteuil.

- Ne fumez pas dans votre fauteuil lorsqu'il est en mouvement, lorsque vous actionnez le mécanisme à l'aide de la télécommande ou lorsque vous vous y reposez.
- Pour prévenir tout accident électrique : n'immergez aucun des éléments électriques de votre fauteuil dans du liquide - n'aspergez aucun liquide sur ces éléments électriques - ne jamais ouvrir un élément électrique. Votre fauteuil est équipé d'un transformateur permettant de réduire la tension de votre prise murale 220V courant alternatif (AC) en 29V courant continu (DC)
- La garantie sera annulée si un des éléments électriques est ouvert par une personne non habilitée. Veillez à ce que les éléments électriques soient à l'abri de l'humidité.
- **Assurez-vous que le fauteuil est à bonne distance du mur.** Ne pas respecter cette consigne peut endommager votre fauteuil et annuler la garantie.
- N'utilisez pas de rallonge électrique pour relier votre fauteuil releveur ou relax électrique à une prise électrique, ou le brancher au courant secteur. Les sous-tensions peuvent endommager le moteur. Evitez un nombre excessif d'appareils ménagers branchés sur le même circuit ou la même prise.
- Veillez à respecter les capacités du fauteuil en termes de poids supporté (cf. documentation commerciale).
- En moyenne pour les fauteuils de la marque SENIORTYS, le poids maximum de l'utilisateur est de 100 kg.



INSTALLATION DE VOTRE FAUTEUIL

1. Placez votre fauteuil à l'endroit choisi de votre pièce en gardant une distance minimale d'au moins 55 cm entre le mur ou tout autre obstacle et l'arrière de votre fauteuil. (Dossier droit en position assise).
2. Certains tapis (épais) peuvent gêner le bon fonctionnement de votre fauteuil. Assurez-vous que le repose-jambes ne frotte pas sur le tapis quand vous l'actionnez.
3. Retirez le transformateur de son emballage.
4. Pour les fauteuils équipés d'un mécanisme électrique, connectez le câble électrique du moteur au transformateur et branchez le transformateur à une prise d'alimentation murale de courant secteur 220V.
5. Installation du dossier : Actionnez la télécommande jusqu'à ce que les pattes de fixation du dossier soient dégagées de l'arrière de l'assise.
6. Assurez-vous que le sol soit « de niveau ». Sinon compensez le niveau à l'aide des pieds ajustables lorsque votre fauteuil en est équipé (réglage de la hauteur assuré par des patins antidérapants (ne marquant pas le sol) montés sur une tige filetée à visser ou dévisser. Un mauvais appui (calage) sur les pieds du fauteuil peut entraîner pendant son utilisation un bruit de craquement et/ou un mouvement discontinu et non régulier lors du fonctionnement des mécanismes).

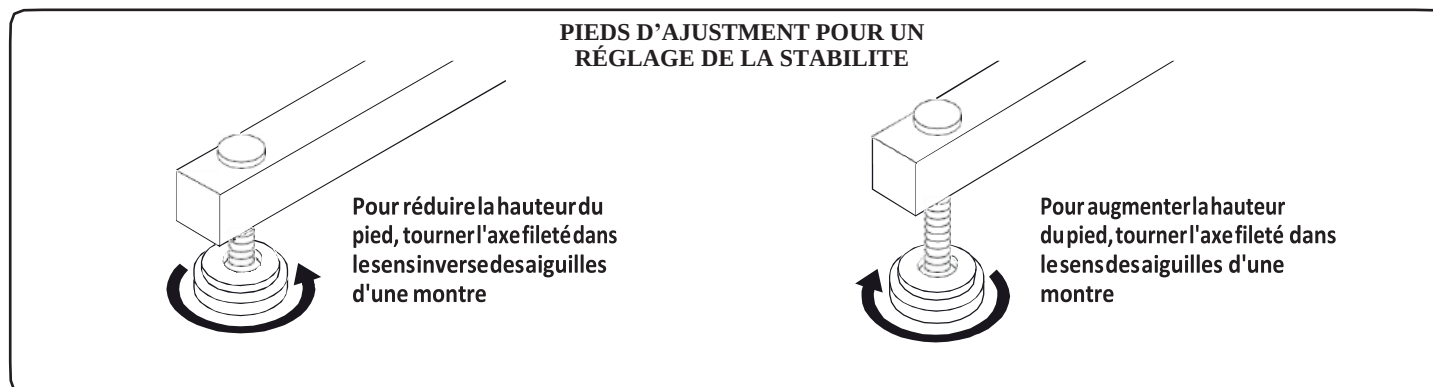


7. Assurez-vous que le câble électrique (reliant le vérin au transformateur) ne soit pas coincé dans les articulations et mécanismes du fauteuil.

ASSEMBLAGE DU DOSSIER D'UN FAUTEUIL

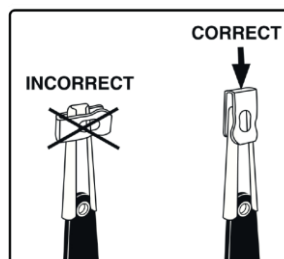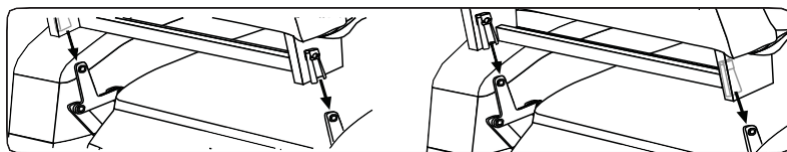

Etape 1 : Inclinez le dossier et positionnez-le entre les pattes de fixation.

Etape 2: Faites coulisser l'équerre dans le rail de la goulotte jusqu'à ce qu'il soit clipsé (jusqu'à ce que vous entendiez un click significatif).

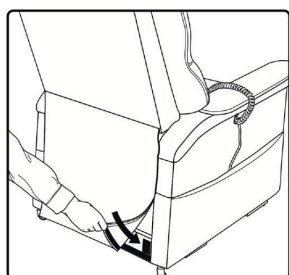

Si votre fauteuil en est équipé, positionner la jupe arrière pour cacher le mécanisme du fauteuil.

Le fauteuil doit être déplacé, débranché et en position assise. Déplacer le avec l'aide d'une seconde personne en évitant de tirer ou d'écarter les accoudoirs, le dossier ou le repose pieds.

Placez votre fauteuil à l'emplacement choisi de la pièce en espaçant votre fauteuil du mur d'au moins 55 cm. Pour un fauteuil 2 moteurs avec la position lit, écarter le fauteuil du mur d'une distance équivalente à la hauteur du dossier.

UTILISATION DE VOTRE FAUTEUIL

• TELECOMANDE DE FAUTEUIL RELEVEUR MONOMOTEUR



Pour incliner votre dossier, appuyez sur la touche ▼ (DOWN) et maintenez appuyée jusqu'à la position désirée, puis relâchez la touche.

Pour retourner à la position Assise, appuyez sur la touche ▲ (UP) et maintenez appuyée jusqu'à la position assise, puis relâchez la touche.

Pour mettre le fauteuil en position Releveur, appuyez sur la touche ▲ (UP) maintenez appuyée touche jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez la

Pour retourner en position Assise, appuyez sur la touche ▼ (DOWN) et maintenez appuyée jusqu'à la position assise, puis relâchez la touche.

Pour passer de la position Relax ou Repos à la position Releveur, appuyez sur la touche ▲ (UP) et maintenez appuyée ; le fauteuil passera par la position Assise et commencera à se lever. Relâchez la touche quand vous avez atteint la position souhaitée.

Pour passer de la position Releveur à la position Repos ou Relax, appuyez sur la touche ▼ (DOWN) et maintenez appuyée, le fauteuil passera par la position Assise et commencera à s'incliner. Relâchez la touche quand vous avez atteint la position souhaitée.

S'installer dans le fauteuil (en position releveur), devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur la touche ▲ (UP) et relever votre fauteuil jusqu'à la hauteur souhaitée. La hauteur adaptée varie d'une personne à une autre, en fonction des hauteurs de jambes et besoins de chacun. Le coussin d'assise doit venir soutenir les fessiers. Il faut relever le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous risqueriez de vous blesser et vous risquez d'endommager votre fauteuil. Appuyez sur la touche de la fonction inclinaison pour faire descendre le fauteuil. Maintenez la touche appuyée et laissez-vous accompagner confortablement appuyé sur les fessiers jusqu'à la position assise ou jusqu'à la position relax ou repos souhaitée. Puis relâchez la touche.

Sortir du fauteuil (en position releveur), appuyez sur la touche ▲ (UP) et relevez votre fauteuil jusqu'à la hauteur vous permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez la touche. Remettre le fauteuil, après en être sorti, en position Assise (assise à l'horizontale = patins, sabots ou pieds arrières du fauteuil en appui) pour qu'aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil.


Lorsque vous actionnez le mécanisme du fauteuil veillez à être bien positionné dans le fauteuil, calé au centre et confortablement installé au fond de l'assise.

NB: si vous n'utilisez pas la fonction releveur pour l'aide à l'assise, si celui-ci est en position assise, veillez à ce que le repose pieds soit en position verticale et la surface d'assise en position « horizontale ». La partie arrière du fauteuil doit être bien en appui sur la structure métallique fixe posée sur le sol. Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous asseoir lorsque celui-ci est légèrement incliné ou relevé. Vous risquez d'endommager les têtes et pattes de fixation du vérin.

• TÉLÉCOMMANDE DE FAUTEUIL BI-MOTEURS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN FAUTEUIL RELEVEUR ÉQUIPÉ DE 2 MOTEURS :

Vous disposez d'une combinaison infinie de positions. Vous pouvez actionner le moteur du dossier indépendamment du moteur du repose-jambes.

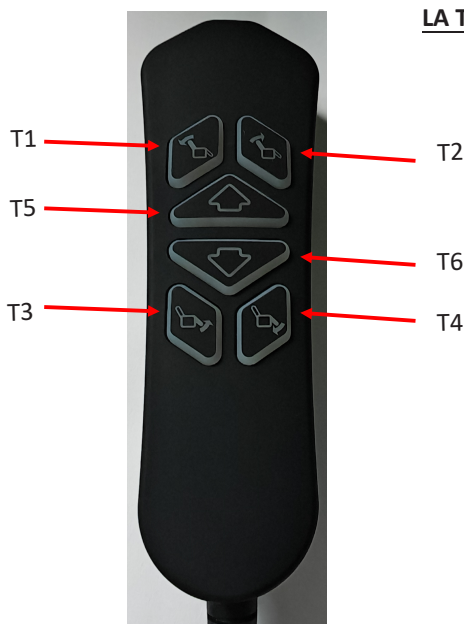

LA TÉLÉCOMMANDE « 6 TOUCHES » :

(T1) **Pour incliner uniquement le dossier**, appuyez sur la touche et maintenez jusqu'à la position désirée

(T2) **Pour ramener le dossier verticalement**, appuyez sur la touche et maintenez jusqu'à la position désirée

(T3) **Pour lever uniquement le repose-jambes**, appuyez sur la touche et maintenez jusqu'à la position désirée

(T4) **Pour baisser le repose-jambes**, appuyez sur la touche et maintenez jusqu'à la position désirée. En maintenant la touche, le fauteuil va prendre la position releveur.

Les 2 boutons de la rangée du milieu, (T5) et (T6) coordonnent le fonctionnement des deux moteurs l'un après l'autre : d'abord le repose-pied puis le dossier.

(T5) Pour rabattre le repose-pieds et ensuite passer en position releveur.

(T6) pour atteindre la position TV : relève le repose pieds sans incliner le dossier

S'installer dans le fauteuil (en position releveur), devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur la touche T5 et relever votre fauteuil jusqu'à la hauteur souhaitée. La hauteur adaptée varie d'une personne à une autre, en fonction des hauteurs de jambes et besoins de chacun. Le coussin d'assise doit venir soutenir les fessiers. Il faut relever le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous risqueriez de vous blesser et vous risquez d'endommager votre fauteuil. Appuyez sur la touche T6 pour faire descendre le fauteuil. Maintenez la touche T6 appuyé et laissez-vous accompagner confortablement appuyé sur les fessiers jusqu'à la position assise ou jusqu'à la position relax ou repos souhaitée. Puis relâchez la touche


NB: si vous n'utilisez pas la fonction releveur pour l'aide à l'assise, et que vous vous asseyiez dans votre fauteuil, lorsque celui-ci est en position assise, veillez à ce que le repose pieds soit en position verticale et la surface d'assise en position «horizontale». La partie arrière du fauteuil doit être bien en appui sur la structure métallique fixe posée sur le sol. Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous asseoir lorsque celui-ci est légèrement incliné ou relevé. Vous risquez d'endommager les têtes et pattes de fixation du vérin.

Sortir du fauteuil (en position releveur), appuyez sur la touche T5 et relevez votre fauteuil jusqu'à la hauteur vous permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez la touche. Remettre le fauteuil, après en être sorti, en position Assis (assise à l'horizontale = patins, sabots ou pieds arrières du fauteuil en appui) pour qu'aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil.


Cette télécommande offre l'avantage de pouvoir coordonner le fonctionnement des 2 moteurs en montée ou en descente. Lorsque vous appuyez sur la touche supérieure T5 vous relevez le fauteuil. Lorsque vous appuyez sur la touche T6, vous relevez le repos- pieds et inclinez le dossier.

Remarque : **Votre Fauteuil peut être arrêté à chaque instant pendant la montée ou la descente, simplement en relâchant la pression exercée sur l'une des touches** de la télécommande, vous offrant ainsi un large choix de positions confortables. Choisissez la position qui vous convient le mieux. **Le moteur est conçu de telle sorte qu'il s'arrête automatiquement quand votre fauteuil a atteint la position maximale** en position Releveur ou en position Repos, même si vous continuez d'appuyer sur la touche de la télécommande. Si vous avez arrêté le mécanisme au-delà de la position souhaitée, sélectionner l'autre bouton pour revenir à la position voulue.



• TÉLÉCOMMANDE DE FAUTEUIL 4 MOTEURS (tête et cousin lombaire électriques)

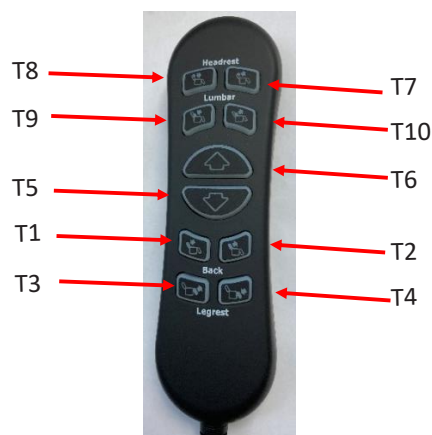


- (T1) Pour incliner le dossier, appuyez sur la touche et maintenez jusqu'à la position désirée
- (T2) Pour ramener le dossier verticalement, appuyez sur la touche et maintenez jusqu'à la position désirée
- (T3) Pour lever le repose-jambes, appuyez sur la touche et maintenez jusqu'à la position désirée. En maintenant la touche, le fauteuil va prendre la position releveur.
- (T4) Pour baisser le repose-jambes, appuyez sur la touche et maintenez jusqu'à la position désirée.
- Les 2 boutons de la rangée du milieu, (T5) et (T6) coordonnent le fonctionnement des deux moteurs l'un après l'autre : d'abord le repose-pieds puis le dossier.
- (T5) Pour prendre la position TV et ensuite incliner le dossier en maintenant la touche
- (T6) Pour passer en position releveur quelle que soit la position du fauteuil
- (T7) Pour incliner le repose-tête
- (T8) Pour rentrer le repose-tête
- (T9) Pour faire bomber le dossier au niveau des lombaires
- (T10) Pour faire rentrer le dossier au niveau des lombaires

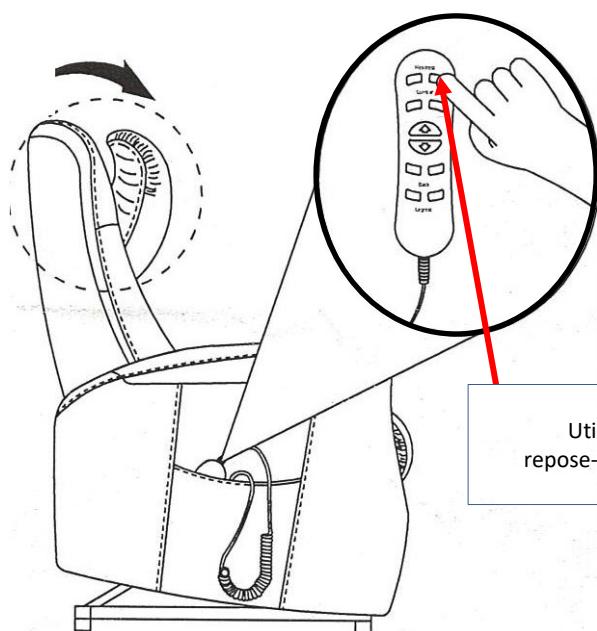

Utilisation du
repose-tête électrique

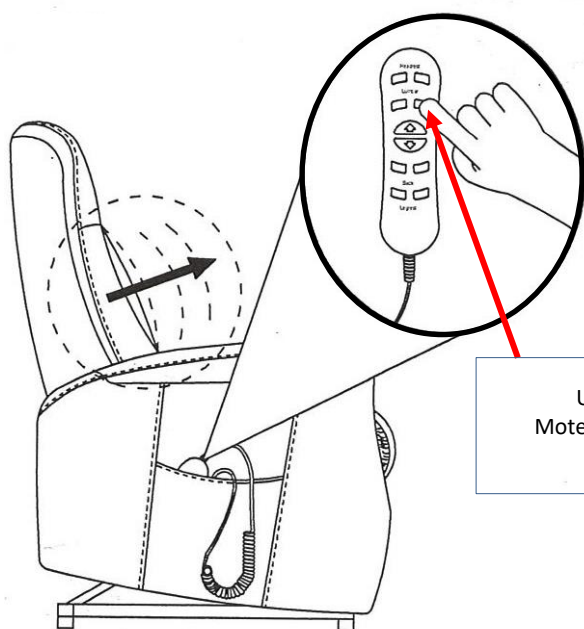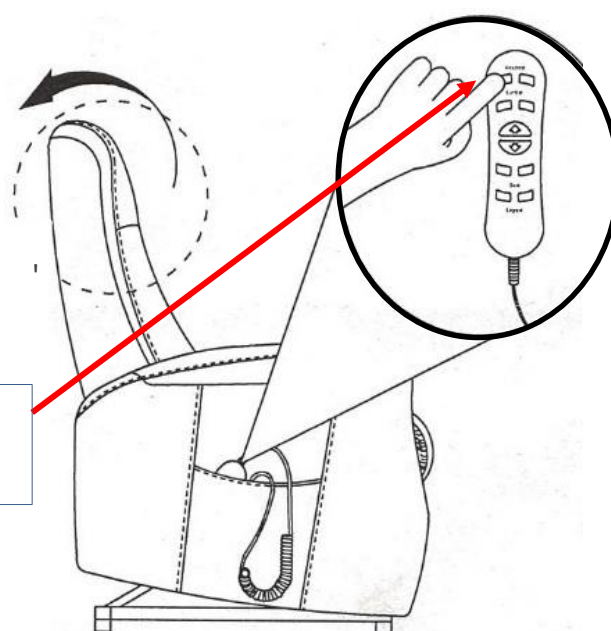

Utilisation du
Moteur au niveau des
lombaires

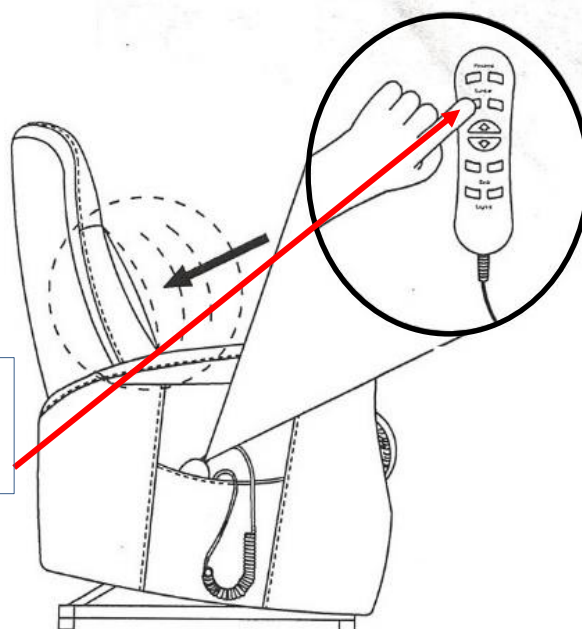


Position du repose-tête incliné

ASSEMBLAGE DE DOSSIER pour fauteuil à deux profondeurs d'assise

Le fauteuil CANBERRA dispose de deux profondeurs d'assise. Le dossier est équipé de 2 rails qui permettent de choisir la profondeur.

Profondeur d'assise : 44 cm

Profondeur d'assise : 53 cm

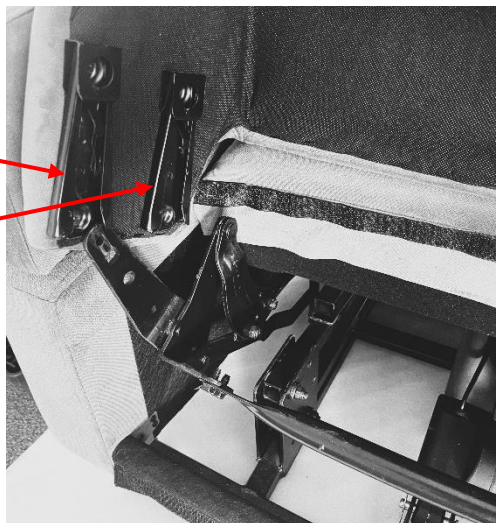

Selon la patte de fixation du dossier choisie, la profondeur d'assise du fauteuil sera de 44 ou de 53 cm.

- ⇒ Patte la plus à l'extérieur : profondeur de 44 cm
- ⇒ Patte la plus à l'intérieur : profondeur de 53 cm

FAUTEUIL EQUIPE D'UNE EXTENSION DE REPOSE-JAMBES


Certains de nos fauteuils bi-moteurs, sont équipés d'une extension de repose-jambes. Le principe est simple : quand l'utilisateur relève le repose-jambes, un coussin se déplie et ajoute 8 cm de longueur au repose-jambes. L'intérêt de ce mécanisme est d'améliorer le confort des jambes en soutenant les pieds en cas de position prolongée avec les jambes relevées. En rabaisant le repose-jambes, l'extension de repose-jambes se replie mécaniquement et elle est cachée quand le fauteuil est en position assise.



Cette extension de repose pieds est prévue pour soutenir le talon et soulager le tendon ou mollet au niveau du point d'appui ou de compression. Elle n'est pas prévue pour accueillir des charges lourdes, et encore moins de supporter le poids du corps, notamment en position assise. Toute mauvaise utilisation peut entraîner des dommages sur les mécanismes de repli ou déploiement de cette extension de repose-pieds, qui ne seront pas pris en charge au titre de la garantie

FAUTEUIL EQUIPE D'UN « KIT ROULETTES »


Si l'utilisateur souhaite déplacer le fauteuil sur une plus grande distance, d'une pièce à une autre par exemple, certains modèles peuvent être équipés d'un système ingénieux qui facilite le déplacement du fauteuil : en actionnant la pédale du kit à l'arrière du fauteuil, il est possible de mettre le fauteuil sur 4 roulettes.

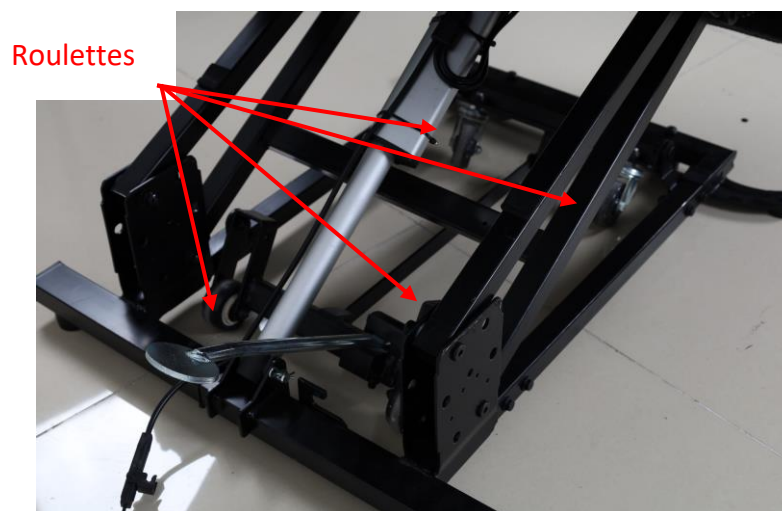

Pédale levée : « kit roulettes » non actionné, le fauteuil repose sur ses pieds fixes.


Attention Danger : pour éviter tout risque d'accident, personne ne doit s'asseoir dans le fauteuil quand le fauteuil est sur les 4 roulettes. L'utilisateur pourrait se blesser et tomber en contrevenant à cette recommandation. Toujours s'assurer que le fauteuil repose sur les 4 pieds fixes avant d'utiliser le fauteuil.

Pour actionner le « kit roulettes » il suffit d'appuyer avec le pied sur la pédale et de bloquer la manette dans l'emplacement prévu à cet effet.

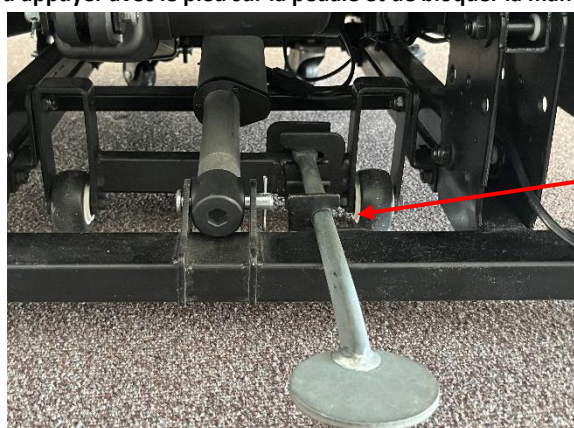

Pédale baissée : le fauteuil est sur les 4 roulettes

Pour désactiver le « kit roulettes » il suffit d'appuyer sur la pédale pour dégager la manette de l'emplacement de

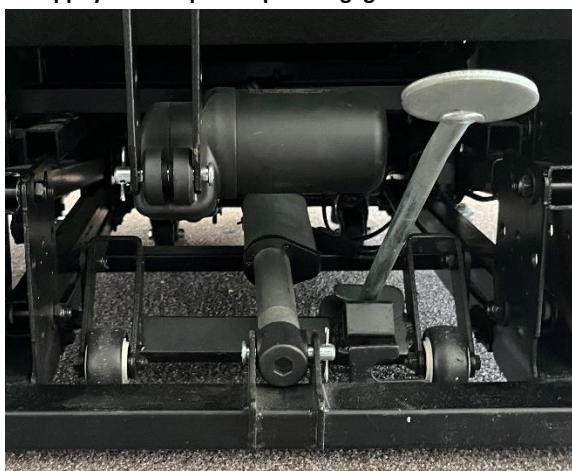

Pédale levée : « kit roulettes » non actionné, le fauteuil repose sur ses pieds fixes.

TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT

- Votre fauteuil électrique ne nécessite aucun entretien particulier. Votre fauteuil peut être équipé d'un témoin lumineux sur la télécommande.
- Ce témoin s'allume (couleur verte) lorsque vous appuyez sur une des touches de la télécommande (vous indiquant ainsi que votre télécommande est branchée et fonctionne).
- Votre fauteuil électrique peut être pourvu d'un témoin lumineux sur le transformateur. Ce témoin est allumé en permanence (vert) lorsque votre fauteuil est branché sur le courant (220V).
- Ces témoins lumineux « d'auto diagnostic » vous permettent de contrôler et vérifier par vous-même rapidement et facilement l'état des branchements (exemple : un câble de raccordement pincé, écrasé ou débranché) et des composants électriques (transformateur grillé suite à une surtension après un orage par exemple). Ces témoins peuvent vous servir à diagnostiquer un éventuel dysfonctionnement.
- En cas de besoin, ils permettront également à votre revendeur d'identifier un type de panne, la ou les pièces défectueuses.
- Si votre fauteuil rencontre un problème de fonctionnement, cessez d'utiliser votre fauteuil avant d'avoir décelé d'où vient le problème (Problème de transformateur, de télécommande, de cordons ou de raccordements électriques, problème de mécanisme, ou de vérin...).
- Contactez le magasin chez qui vous avez acheté votre fauteuil. Il sera capable de résoudre le problème, d'intervenir et d'effectuer les changements si nécessaire. Il vous demandera si tous les témoins lumineux sont allumés (vert) ou si une diode ne s'allume pas. Vérifiez que les branchements sont correctement réalisés. Les équipements électriques (transformateur, vérins...) répondent aux normes et réglementation CE en vigueur.

CONSEILS D'ENTRETIEN DU REVETEMENT DE VOTRE FAUTEUIL

- Brossez à l'aide d'une brosse souple ou aspirez régulièrement votre fauteuil pour éliminer poussière, miettes et matières textiles ou autres amalgamées.
- Pour les tâches, n'utilisez ni détergents forts, ni dissolvants. Utilisez une eau tiède savonneuse ou éventuellement un shampoing pour tissu d'ameublement. Utilisez une brosse souple en effectuant un mouvement circulaire. Épongez, laissez sécher et aspirez la surface concernée. (Faites un essai d'abord sur une petite zone non voyante pour valider votre solution de nettoyage).
- N'exposez pas le revêtement de votre fauteuil directement à une source de chaleur. (Centrale vapeur, fer à repasser, cigarettes ou cendres). Évitez les sources lumineuses directes trop fortes.

GARANTIES

En sus des obligations légales visant à garantir la conformité du bien, votre fauteuil bénéficie d'une garantie commerciale.

MEDTRADE, AU TRAVERS DE SON DISTRIBUTEUR, GARANTIT LE 1^{er} UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION DE LA FAÇON SUIVANTE A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.

GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE À 2 ANS

- ⇒ MEDTRADE garantit pendant 2 ans le châssis en bois et le mécanisme du fauteuil (châssis fixe, mécanisme de relevage et mécanisme de bascule).
- ⇒ MEDTRADE garantit pendant 2 ans le transformateur et le(s) moteur(s). La main d'œuvre est comprise dans la limite de 1 an.
- ⇒ MEDTRADE garantit pendant 2 ans la télécommande.
- ⇒ LA GARANTIE COMMERCIALE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT ((du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s), de la télécommande) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil, les pièces défectueuses ou la télécommande et établir un diagnostic.

Dans tous les cas de figure, la Main d'œuvre est comprise dans la garantie dans la limite de 1 an.

N.B. : Le fabriquant se réserve le droit de remplacer seulement la pièce du mécanisme qui s'avère défectueuse. En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protections et dispositifs de sécurité. Lisez et suivez les instructions, consignes et mise en garde pour éviter les risques de vous blesser ou d'endommager votre intérieur et de prendre le risque d'annuler la présente garantie.

CES GARANTIES S'APPLIQUENT POUR DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

A TITRE D'EXEMPLE, LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Aux pièces d'usure et notamment les revêtements tissus, velours, skaï ou autres revêtements
- Lorsque la pièce faisant l'objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à des fins abusives, à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention ou lors de l'ouverture des emballages de transport et de protection, modifiée ou réparée par des personnes non agréées
- Lorsque les composants électriques ont fait l'objet de choc (télécommande tombée sur le sol)
- Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil (pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu'ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple).
- Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre)
- Lorsque la distance d'écartement du mur n'est pas respectée
- Lorsque l'utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil
- Lorsque le fauteuil est utilisé au-delà des limites de tolérance de poids (pour les fauteuils des marques Seniortys, le poids maximum supporté est en moyenne de 100kg)
- Pour couvrir les coûts de visites à domicile du réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défaillante, informations- renseignements sur le produit)
- Aux dommages résultant de l'abus, mauvais usage, réparations non autorisées, négligence, accidents, altérations, chocs ou modification du produit.
- Aux dommages causés pendant la manipulation.
- A tous dommages extraordinaires, directs ou indirects.
- Après la période de garantie, le fabriquant n'aura aucune obligation de quelque type que ce soit.
- Lorsque le fauteuil a été modifié, qu'il n'est plus conforme à l'origine ou que des composants ont été modifiés ou remplacés par des composants non conformes à l'origine.

VOTRE REVENDEUR

Inscrivez et complétez ici, le numéro de série de votre fauteuil :

.....

Ce numéro vous sera demandé pour toute intervention en cas de SAV

date d'achat :/...../20.....

Nom de votre modèle :