



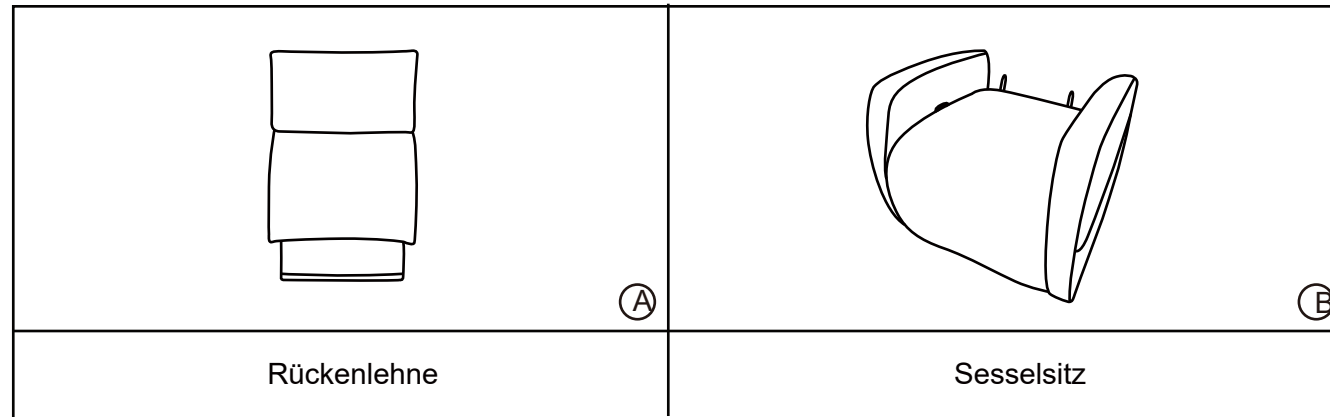


■ Montage

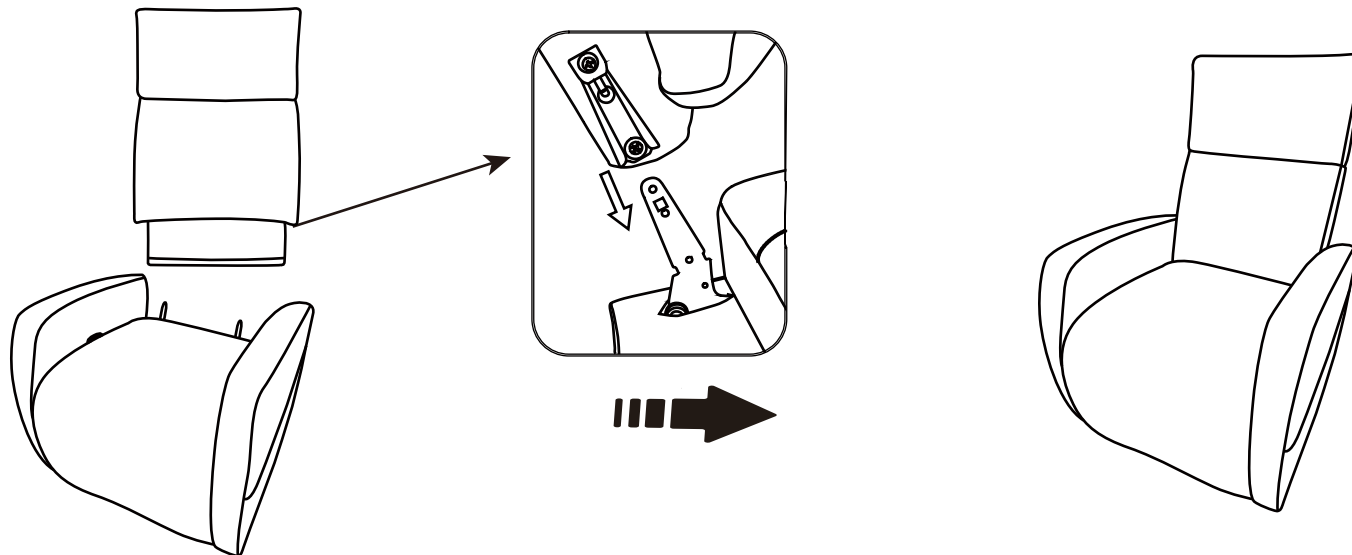


Setzen Sie die Rückenlehne (A) auf das Sesselsitz (B) über die beiden Gleiter.
Drücken Sie sie vorsichtig nach unten, bis die Rückenlehne einrastet.

Verwendung

■ Wie kann man sich zurücklehnen?

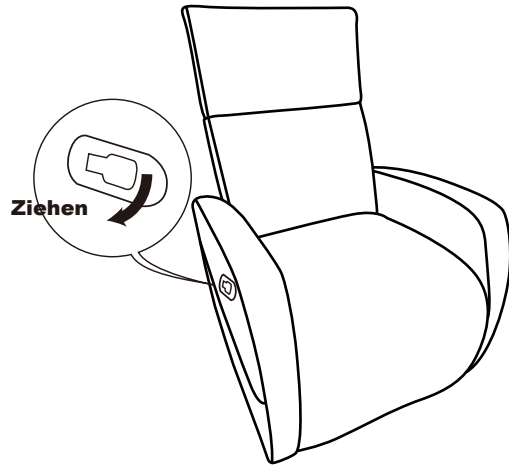


Den Auslöser betätigen, um die Fußstütze zu lösen.

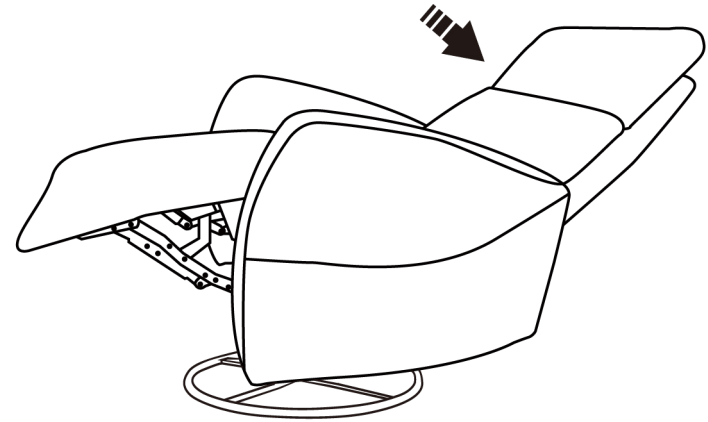


Setzen Sie sich tiefer auf den Sessel, legen Sie die Hände auf die Armlehnen, legen Sie sich zurück und nutzen Sie die Kraft Ihres Kopfes und Rückens, um sich zurückzulehnen. Dann können Sie sich auf dem Sessel entspannen.

■ Wie kann man die Fußstützenverriegelung lösen?

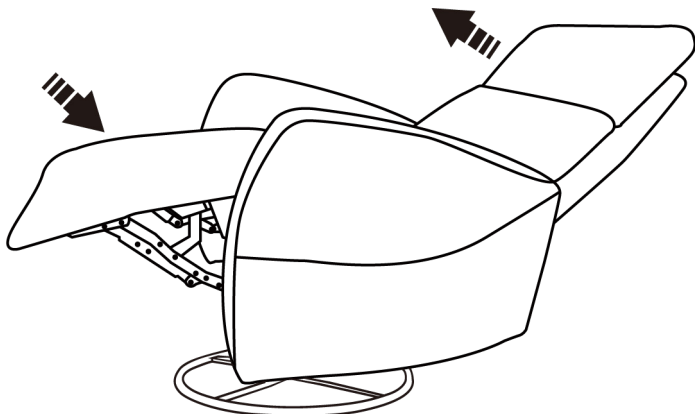


Setzen Sie sich auf den Sessel (nicht zurücklehnen), die Rückenlehne wird nach hinten geklappt. Hinweis: Die Fußstütze lässt sich in der

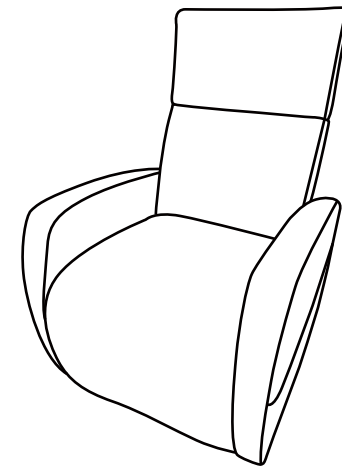


Drücken Sie mit etwas Kraft (mit den Füßen) auf die Unterseite der Fußstütze und versuchen Sie mehrmals, die Verriegelung der Fußstütze zu lösen. Dann befindet sich der Sessel in der Sitzposition

Instructions de montage

Medtrade

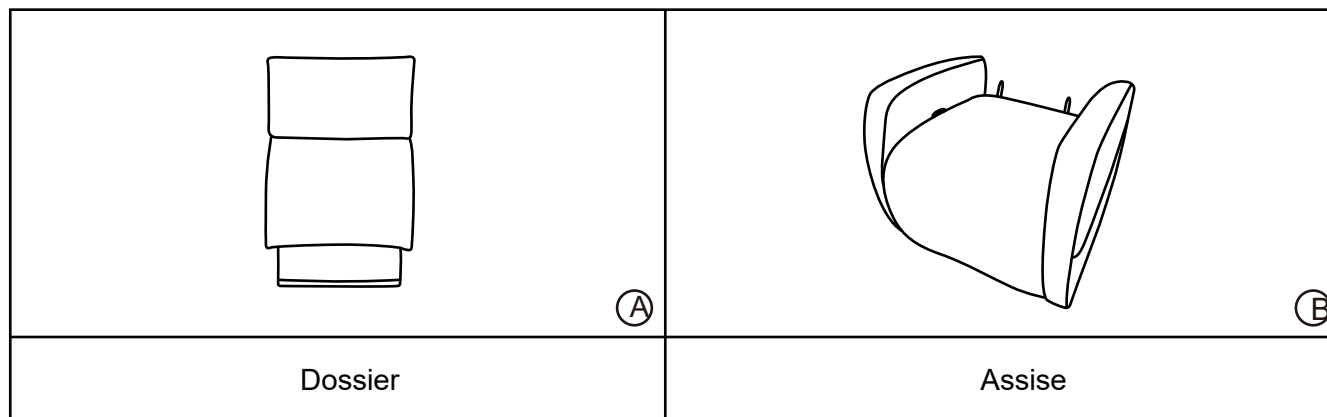


■ Assemblage

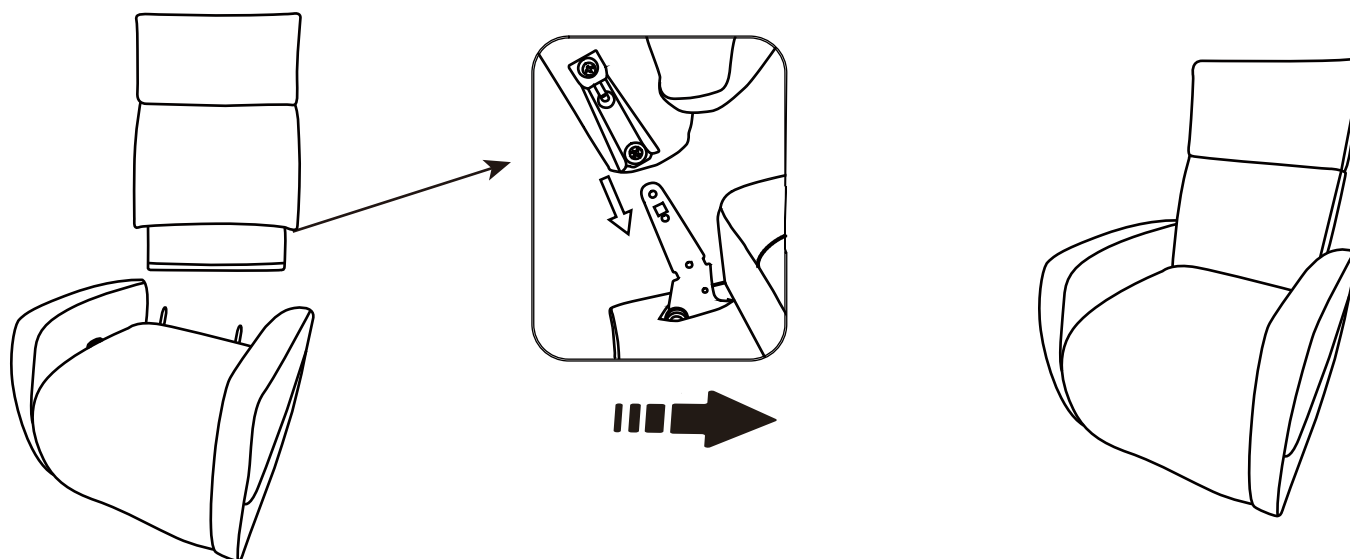


Positionnez le dossier (A) sur l'assise (B), en alignant les deux glissières.
Appuyez doucement vers le bas jusqu'à ce que le dossier s'enclenche correctement.

Utilisation

■ comment incliner le dossier ?

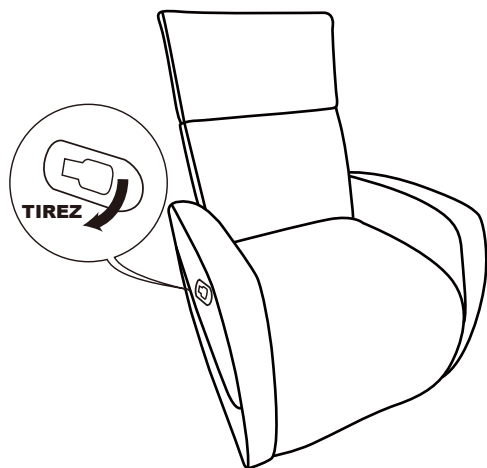


Tirez sur la manette pour déverrouiller le repose-pieds

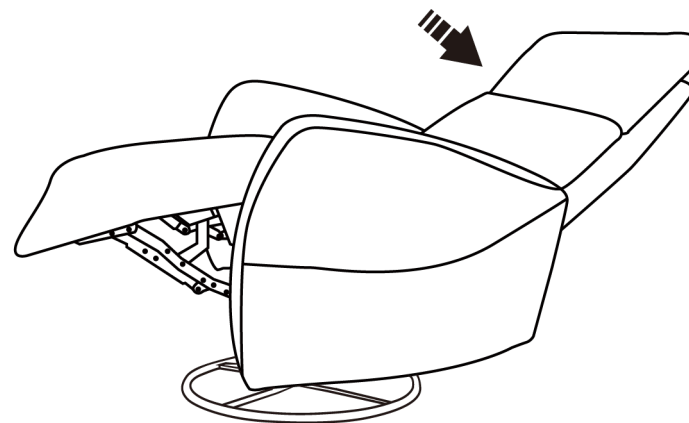


Installez-vous confortablement au fond du fauteuil, placez vos mains sur les accoudoirs, allongez-vous et utilisez la force de votre tête et de votre dos pour incliner le dossier.

■ comment abaisser le verrou du repose-pieds ?

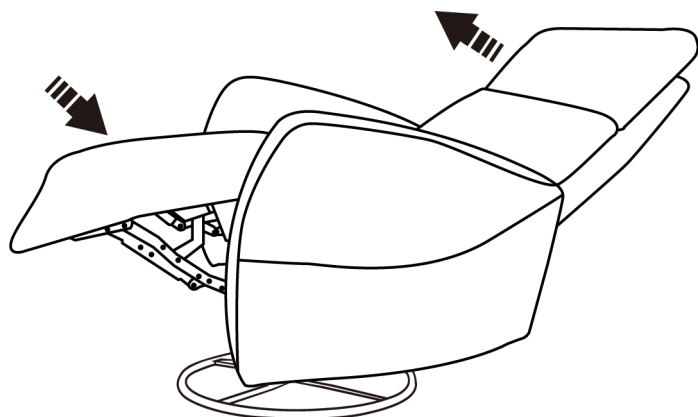

Installez-vous sur le fauteuil (sans l'incliner), le dossier reprendra sa position droite.
Remarque : le repose-pieds ne se referme pas lorsque le fauteuil est incliné.

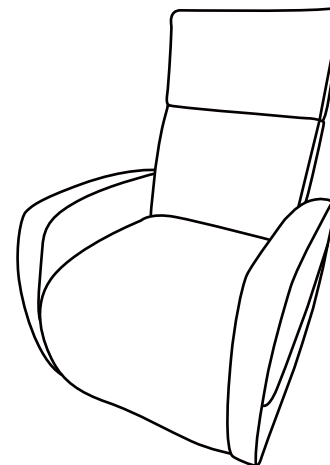

Appuyez fermement sur la partie basse du repose-pieds avec vos pieds, répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire pour le verrouiller. Le fauteuil reviendra alors en position assise.